


# Debrisoft® Pad

## El estándar de oro para desbridamiento mecánico

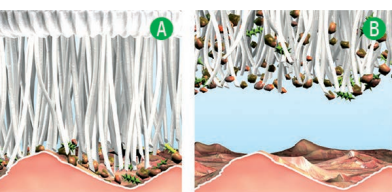

**A** las fibras anguladas remueven activamente detritos y exudado de la herida

**B** el compuesto de fibras absorbe las capas sueltas y las retiene

### Campos de aplicación

- Desbridamiento de heridas agudas, crónicas y superficiales y de la piel circundante a la herida. En caso de:
  - ◆ úlceras diabéticas
  - ◆ úlceras arteriales y venosas
  - ◆ lesiones por presión
  - ◆ heridas postoperatorias con cicatrización por segunda intención
  - ◆ heridas quirúrgicas o traumáticas (p.ej., abrasiones, incisiones, laceraciones)
  - ◆ quemaduras y escaldaduras (3º grado: después de desbridamiento quirúrgico)
  - ◆ linfedema
- Adecuado para piel seca, apergaminada, hiperqueratósica, seborreica o piel sana oleosa o piel dañada.

### Usos previstos:

Debrisoft Pad se usa para desbridamiento rápido, altamente efectivo, seguro y virtualmente indoloro. Debrisoft Pad se usa para absorber exudado, detritos y queratosis de la piel durante el desbridamiento protegiendo el tejido intacto.

### Propiedades

- puntas de fibra anguladas remueven detritos efectivamente de la herida y preservan el tejido aún intacto
- el compuesto de fibra también remueve escamas y queratosis de la piel que circunda la herida
- resultados rápidamente visibles siendo fácil y seguro de usar
- las suaves fibras aseguran una aplicación virtualmente indolora, aumentando la aceptación del paciente

### Composición del producto

Composición: 100% poliéster, sin blanquear  
 Recubrimiento del respaldo: 100% poliacrílico (sin colofonía ni derivados de la colofonía)  
 Bolsillo de agarre: poliéster, poliamida, elastano  
 Etiqueta: poliéster

### Nota

- producto para el desbridamiento, no permanece en la herida
- se puede usar en cada cambio de apósito de necesitarse
- debería ser usado hasta que la herida se haya limpiado por completo y haya pasado de la fase de inflamación a la fase de granulación

### Consejo

- también se pueden obtener muy buenos resultados en superficies hiperqueratosas o necróticas cuando hayan sido tratadas previamente con desbridamiento autolítico
- el lado suave de la fibra puede ser humedecido con cualquier solución común para irrigación de heridas

## Debrisoft® Pad

estéril, sellado de forma individual

Dimensiones (cm)	REF	Unidad de envío (Unidad)
10 x 10	34321	5/50
13 x 20	34323	5/50