

# Suprasorb® C

## Apósito de colágeno para heridas



### Campos de aplicación

Suprasorb C está indicado específicamente cuando no ha habido cambio en el estado de la herida después de tratamiento con otro apósito para heridas.

Indicaciones:

- úlceras diabéticas
- lesiones por presión
- úlceras venosas o vasculares mixtas
- curación por segunda intención de heridas quirúrgicas

### Propiedades

- tiene una estructura porosa con actividad capilar altamente pronunciada que permite la absorción de líquidos
- promueve y acelera la formación de tejido de granulación
- promueve la cicatrización de las heridas\*

### Composición del producto

colágeno de piel de becerro

### Nota

- No se debe usar en áreas clínicamente infectadas, en heridas con niveles de exudado extremadamente altos o con necrosis seca. No se debe usar en casos de alergias conocidas a uno o más productos componentes.

Intervalo de cambio de apósitos:

- El cambio de apósito y su reaplicación depende de las circunstancias. De requerirse, Suprasorb® C puede ser fácilmente remojado y removido con solución salina fisiológica. Si hay altos niveles de exudado, cambie el apósito una o más veces al día.

## Suprasorb® C

estéril, sellado de forma individual

Dimensiones (cm)	REF	Unidad de envío (Unidad)
4,0 x 6,0 x 0,8	20481	5/225
6,0 x 8,0 x 0,8	20482	5/180
8,0 x 12,0 x 0,8	20483	5/90

\* los informes sobre desempeño tienen como base, en su mayoría, datos de estudios no clínicos