


Suprasorb® H

Apósito hidrocoloide para heridas

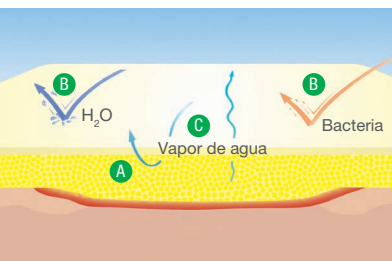

- A** el hidrocoloide se hincha tras absorber el exudado y forma un gel que atrapa exudado y restos de tejido
- B** repele bacterias y líquidos
- C** el exceso de exudado se evapora

Campos de aplicación

Para el tratamiento de heridas superficiales no infectadas con nivel de exudado bajo a moderado.

Indicaciones:

- úlceras arteriales y venosas
- zonas donantes de injertos cutáneos
- heridas quirúrgicas

Propiedades

- alto confort de uso por su fácil aplicación
- particularmente delgado y flexible
- repele bacterias y líquidos
- impermeable al agua
- apoya la cicatrización de heridas porque mantiene un ambiente húmedo de la herida, ayudando por lo tanto al proceso natural de cicatrización de la herida

Composición del producto

lámina de poliuretano con una capa de hidrocoloide

Nota

Intervalo de cambio de apósitos:

- Será determinado por el profesional tratante de acuerdo con la condición de la herida, el nivel de exudado y el apósito secundario usado, pero no mayor de 5 a 7 días. En el evento de abultamiento pronunciado del apósito, mas allá de la superficie de la herida, el apósito debe ser cambiado.

Presentaciones

- Estándar
- delgado
- sacro
- borde

Consejo

- Una presentación delgada de 5 x 5 cm de Suprasorb H está disponible específicamente para tratar el pie diabético.

Suprasorb® H

estéril, sellado de forma individual

	Dimensiones (cm)	REF	Unidad de envío (Unidad)
Estándar			
	10 x 10	108830	10/660
	15 x 15	108831	5/50
	20 x 20	108832	5/50
delgado			
	5 x 5	108860	10/1650
	5 x 10	108861	10/480
	5 x 20	108862	10/250
	10 x 10	108863	10/720
	15 x 15	108864	5/50
	20 x 20	108865	5/50
sacro			
	14 x 16	108867	5/200
borde			
	14 x 14	108866	5/200