
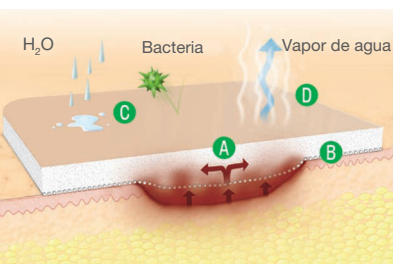


Suprasorb® P

Apósito de espuma de PU

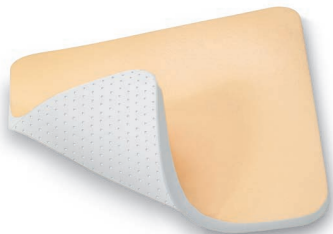

- A** distribución uniforme del exudado de la herida
- B** capa de contacto con la herida perforada
- C** a prueba de bacterias e impermeable al agua*
- D** permeable al vapor de agua

Campos de aplicación

- para heridas con niveles moderados de exudado
- heridas superficiales
- heridas no infectadas
- en todas las fases de cicatrización de heridas, p.ej.:
 - ◆ lesiones por presión y otras úlceras
 - ◆ zonas donantes de injertos cutáneos
 - ◆ heridas quirúrgicas

Propiedades

- muy buena cicatrización de las heridas debido al confiable manejo del exudado
- alto grado de confort al usarlo debido a la estructura del material suave y flexible
- fácil valoración del exudado de la herida
- la membrana de PU repele bacterias y líquidos
- mantiene un ambiente húmedo para cicatrización de la herida ayudando al proceso natural de cicatrización

* Suprasorb P no adherente

Nota

Intervalo de cambio de apósitos:

- Será determinado por el profesional tratante de acuerdo con la condición individual de la herida, el nivel de exudado y el apósito secundario usado, pero no mayor de 5 a 7 días. Cambie el apósito de inmediato cuando los bordes de la herida empiecen a perder color.
- Suprasorb P puede ser usado como apósito secundario para heridas en riesgo de infección dentro del marco de un régimen regular con terapia antimicrobiana.
- Cuando está seco, Suprasorb P puede ser cortado fácilmente a la medida individual de la herida. El apósito debe superponerse sobre los bordes de la herida en cerca de 2 cm.

Presentaciones

- autoadherente
- no adherente
- sacro

Suprasorb® P

estéril, sellado de forma individual

Dimensiones (cm)	Almohadilla (cm)	REF	Unidad de envío (Unidad)
autoadherente			
7,5 x 7,5	4,0 x 4,0	20416	10/100
10,0 x 10,0	6,0 x 6,0	20417	10/100
15,0 x 15,0	10,0 x 10,0	20418	5/50
20,0 x 15,0	15,0 x 10,0	20419	5/50
no adherente			
5,0 x 5,0	5,0 x 5,0	20405	10/100
7,5 x 7,5	7,5 x 7,5	20406	10/100
10,0 x 10,0	10,0 x 10,0	20407	10/100
15,0 x 15,0	15,0 x 15,0	20408	5/50
20,0 x 15,0	20,0 x 15,0	20409	5/50
sacro, autoadherente			
20,5 x 18,0	14,3 x 12,0	20415	5/50