


Suprasorb® X + PHMB

Apósito para heridas HydroBalance antimicrobiano

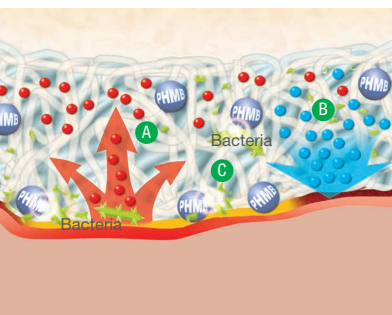

- A** el exceso de exudado de la herida es absorbido en el apósito
- B** el apósito provee humedad dentro de la herida con niveles bajos de exudado
- C** los microbios son eliminados con la liberación de polihexametileno biguanida (PHMB)

Campos de aplicación

Para el cuidado de heridas superficiales o profundas con niveles de exudado entre bajos a moderados que estén infectadas o en riesgo de infección.

Indicaciones:

- úlceras arteriales y venosas
- úlceras diabéticas
- lesiones por presión
- quemaduras superficiales de 2° grado
- heridas postoperatorias
- injertos cutáneos
- zonas donantes de injertos cutáneos
- abrasiones y laceraciones

Usos previstos:

Suprasorb® X + PHMB Apósito antimicrobiano para heridas HydroBalance / Mecha (relleno) ayuda en la cicatrización/reducción del área de heridas en riesgo de infección o heridas infectadas.

Propiedades

- se puede suministrar humedad a la herida o absorber el exceso de exudado
- creación de un ambiente húmedo de la herida
- cambio atraumático de apósitos
- de fácil adaptación a la forma y profundidad particulares de una herida
- especialmente adecuado para partes del cuerpo difíciles de abordar
- el ambiente húmedo con un efecto refrescante es percibido por los pacientes como placentero y calmante
- acción antimicrobiana contra un amplio espectro de gérmenes, tales como SARM y ERV*.

Composición del producto

agua
celulosa
0,3% polihexametileno biguanida (PHMB/polihexanida)

Nota

- Al tratar con heridas infectadas, el apósito para heridas no debería ser la única medida terapéutica usada, sino mas bien debería ser suplementada con terapia farmacológica a discreción del médico tratante de acuerdo con los protocolos clínicos locales.

Por favor, comuníquese con su médico o enfermera si alguno de los siguientes síntomas aparece:

- cambio del color/olor en la herida
- cicatrización de las heridas que no avanza

- signos clínicos de infección

Intervalo de cambio de apósitos:

- Los intervalos a los que se deberá cambiar Suprasorb® X + PHMB estarán determinados por los profesionales de la salud tratantes con base en la condición de la herida.

Presentaciones

- Apósito
- Mecha

Consejo

- Si el apósito se llega a secar, debe haber rehidratación adecuada, con un tiempo de aplicación de por lo menos 10 minutos antes de retirarlo.

Suprasorb® X + PHMB

Apósito para heridas HydroBalance antimicrobiano

Suprasorb® X + PHMB

estéril, sellado de forma individual

Dimensiones (cm)	REF	Unidad de envío (Unidad)
Apósito		
5 x 5	20540	5/90
9 x 9	20541	5/80
14 x 20	20542	5/65
Mecha		
2 x 21	20543	5/130

* Espectro de patógenos detectados in vitro, ver primera columna de las Instrucciones de Uso.